



OMEGA OPTIX

Istruzioni per l'uso (manipolazione) - per lenti per occhiali

Nome del prodotto: Lenti diottriche organiche

Scopo del prodotto: "Le lenti per occhiali vengono utilizzate per correggere difetti visivi come: miopia, ipermetropia, astigmatismo o presbiopia."

Possibili effetti collaterali: "Se la correzione viene scelta in modo errato, gli individui possono perdere l'orientamento o avere alterazioni della vista."

Come conservare il prodotto: "Conservare le lenti per occhiali in un ambiente asciutto a una temperatura compresa tra -20 °C e + 50 °C Conservare le lenti per occhiali nella loro confezione originale. "

Come prendersi cura del prodotto: "Non posizionare la montatura a faccia in giù.

Utilizzare un materiale adatto per pulire le lenti degli occhiali: un panno morbido, preferibilmente in microfibra, non utilizzare mai un panno ruvido. Non pulire le lenti a secco. "

Avvertimento:

"I nuovi occhiali (in caso di variazioni diottriche o passaggio a lenti multifocali) richiedono l'abitudine alle nuove lenti.

Queste lenti per occhiali non sono destinate a proteggere gli occhi dell'utente da infortuni.

Non utilizzare lenti per osservare direttamente il sole.

L'uso di detergenti contenenti acetone, metanolo, ammoniaca e altri solventi può danneggiare alcuni tipi di lenti.

Non lavare lo strato antiscivolo e la tampografia della lente prima di tagliare le lenti.

Non utilizzare lenti colorate all'85% o più per la guida notturna."

Produttore: Il manuale di istruzioni è stato revisionato

