



# OMEGA OPTIX

## Návod k použití (manipulaci) - pro brýlové čočky

Uchovávejte brýlové čočky v suchém prostředí při rozmezí teplot od -20 C° do + 50 C°

Uchovávejte brýlové čočky v originálním obalu.

Nepokládejte čočky přední stranou dolů.

Pro čištění brýlových čoček používejte vhodný materiál – měkký hadřík, nejlépe z mikrovlákna, nikdy nepoužívejte hrubý hadřík.

Nečistěte čočky na sucho.

Použití čisticidel obsahující aceton, methanol, amoniak a jiná rozpouštědla může některé typy čoček poškodit.

Ochrannou vrstvu proti prokluzu a potisk čočky nesmývejte před zabroušením čočky.

### Upozornění:

- 1/ Nové brýle (v případě změny dioptrií nebo přechodu na multifokální čočky) vyžadují návyk na nové čočky.
- 2/ Tyto brýlové čočky nejsou určeny k ochraně zraku uživatele před poraněním.
- 3/ Nepoužívejte čočky k přímému pozorování slunce.

